

Slidiy

スライディ

NEW

スライディM

スライディ



介護保険福祉用具貸与品・特殊寝台付属品

障がい者総合支援・日常生活用具

対象者 車いすで移乗が必要な人

1. どこでも簡単に使えるよう スモール&ライトを実現

独自の形状としなりで、橋渡しやボードの抜き差しも簡単になり、スムーズな移乗を可能とし、さらに軽量も実現いたしました。小さくて軽いので、簡単に持ち運びができます。

2. 持ち運びがしやすい収納袋を標準装備

どんな車いすにも取り付けられる収納袋に入れて、簡単に持ち運べるため、【家中】や【外出先】など、どこでも使用できます。


回転動作 としなり で移乗



ボードを小さくするために回転動作で移乗するのに最良な形状にしました！

やわらかく、しなりがあり反発力によってスムーズに移乗ができます！

家中 や 外出先 での使用例

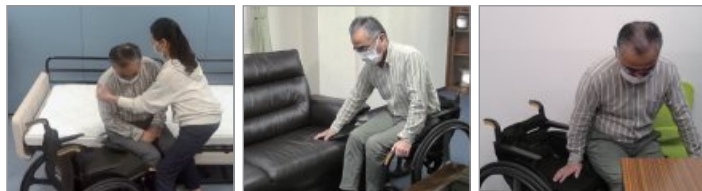

ベッド～車いす

車いす～ソファ

車いす～テーブル席



車いす～便座

どんな車いすにも取り付け・取り外し可能なスライディ収納袋を標準装備！



取り付け例


<介助での移乗のポイント> 車いす～ベッド



車いすを30度ぐらいを目安にベッド脇に付ける



スライディをお尻の下に差し込む

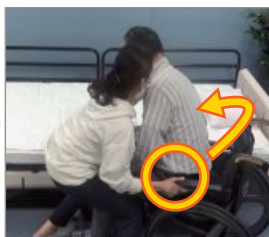

腰に手を添え、回転するようにスッと押し出す



スライディを引き抜き移乗完了

動画で見る製品情報



詳しい移乗方法は
こちらから！

タイプ	品番	TAISコード	サイズ(cm)			重量(kg)	素材	価格
			長さ	幅	厚さ			
スライディ	MSLD	00054-000449	65	18	0.5	0.35	pp (裏面滑り止めシート付き)	9,900円 (税抜価格9,000円)
スライディ M	MSLDM	00054-000495	65	30	0.4	0.45		11,000円 (税抜価格10,000円)

※ 最大使用者体重：100kg

開発・製造・販売元
株式会社 モルテン 健康用品事業本部 www.molten.co.jp/health
東京：03-3625-8510 札幌：011-261-7227 仙台：022-390-5131 埼玉：048-652-6530
名古屋：052-559-1991 大阪：06-6773-0425 広島：082-842-6094 福岡：092-441-0216



ISO9001 認証取得

ISO13485 認証取得

※床ずれ防止マットレス・体動センサの設計、製造および付帯サービスにて取得